

## MISE EN MODE MANUEL


Pour désactiver les moteurs, c'est-à-dire pour qu'une tierce personne puisse pousser le fauteuil, il faut tirer les tiges jaunes en forme de "L" situées derrière le fauteuil. Pour activer les moteurs à nouveau, il faut pousser les tiges vers l'avant de l'appareil.



## TRANSFERTS

Avant de s'asseoir au fauteuil ou de s'en relever, il est important de faire attention à plusieurs éléments afin de s'assurer que le transfert se fera de façon sécuritaire.

- 1 Le fauteuil doit **toujours** être éteint lorsque vous souhaitez vous y asseoir ou vous en relever.
2. Avant de se lever, la ceinture de sécurité doit être détachée.
3. Les appuis-pieds devraient être escamotés afin de libérer l'espace devant vous. Pour ce faire, poussez vers l'extérieur les leviers jaunes et poussez les appui-pieds chaque côtés.

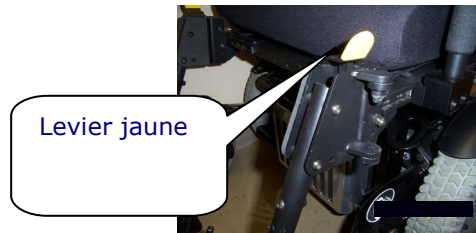

Si le boîtier de contrôle vous gêne lors de vos transferts, il est également possible de l'escamoter. Pour ce faire, il suffit de pousser le boîtier vers l'extérieur.

Pour le ramener à sa position initiale, il suffit de le pousser vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre.

# Quickie 323

FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ



Centre de réadaptation  
**Constance Lethbridge**

7005, de Maisonneuve O.

Montréal Québec

H4B 1T3



## MISE EN MARCHÉ DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en marche, vous devez appuyer sur le bouton vert situé dans le haut du boîtier de contrôle. L'écran s'allumera et le fauteuil sera alors prêt à fonctionner.

## ARRÊT DU FAUTEUIL

Pour éteindre le fauteuil, vous devez appuyer sur le même bouton vert. L'écran s'éteindra et le fauteuil sera hors circuit.




## KLAXON

Le bouton rouge situé sous le bouton vert sert à klaxonner.

## VARIATION DE VITESSE AVEC LA MANETTE

En appuyant délicatement sur la manette, le fauteuil avancera doucement, alors qu'en la poussant au maximum, la vitesse augmentera rapidement.

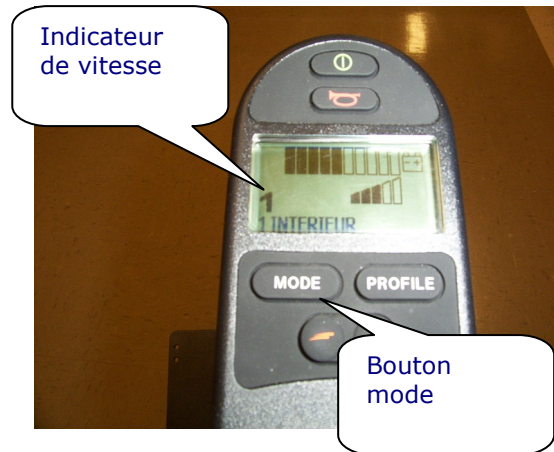

## INDICATEUR DE VITESSE

L'indicateur de vitesse est situé dans le bas de l'écran du boîtier de contrôle. Il est représenté par un chiffre de 1 à 4 (1 étant la plus lente et 4 la plus rapide).

## BOUTON MODE

Ce bouton est utilisé pour faire fonctionner différents éléments électroniques.

Ex: bascule motorisée, appuis jambes motorisés.

## CHANGEMENT DE VITESSE

Le bouton "PROFILE", situé à droite du boîtier de contrôle, est utilisé pour effectuer les changements de vitesse. Ce bouton fonctionne seulement lorsque le fauteuil est immobile. Appuyer autant de fois que nécessaire pour atteindre le niveau de vitesse désiré.



## POTENTIOMÈTRE

Les deux boutons situés dans le bas du boîtier de contrôle servent à augmenter ou diminuer l'intensité de chaque vitesse.

Le bouton de gauche sert à diminuer l'intensité. Lorsqu'il est actionné on voit apparaître sur l'écran une série de bâtonnets gradués du plus petit au plus grand ainsi qu'un dessin d'une tortue et d'un lièvre. Le bouton de droite sert à augmenter l'intensité de la vitesse et le même diagramme apparaît.

## INDICATEUR DE CHARGE

L'indicateur de charge est situé dans le haut de l'écran du boîtier de contrôle. Il est représenté par une série de bâtonnets noirs. Lorsque le fauteuil est pleinement chargé, tous les bâtonnets sont noirs.

Il est temps de recharger le fauteuil lorsque la moitié des bâtonnets ont changé de couleur.

## RECHARGER LA BATTERIE

Il suffit de brancher le fil du chargeur dans le réceptacle prévu à cette fin sous le boîtier de contrôle.

Branchez ensuite le fil du chargeur dans une prise standard.

